



特殊寝台(電動ベッド)・ 特殊寝台付属品

介護保険レンタル対象品

特殊寝台／サイドレールが取り付けられているものまたは取
付可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの

● 背部または脚部の傾斜角度を調整できる機能

● 床板の高さを無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品／マットレス、サイドレール等で、特殊
寝台と一体的に使用されるものに限る

特殊寝台(電動ベッド)・特殊寝台付属品の選び方

特殊寝台は起居動作と立ち上がり動作を助けるものです。本人
の動作と特殊寝台の機能を結び付けて、商品の選定を行いましょ
う。また、体格によりサイズも変更することが可能です。特殊寝
台には「背上げ機能」「膝上げ機能」「昇降機能」「背上げ膝上げ連
動機能」があります。「背上げ膝上げ連動機能」は背上げと膝上

げが連動して動く機能です。2モーターベッドは、主に背上げ膝
上げ連動機能と昇降機能を持っています。3モーターベッドは主
に背上げ機能・膝上げ機能・昇降機能を体の状態に合わせて独
立して動かすことができます。

特殊寝台の選び方

1 モーター タイプ


立ち上がりの補助に
起き上がりの補助に

■ 背上げ機能



または


■ 昇降機能

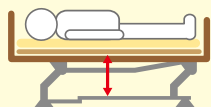


2 モーター タイプ

起き上がりと立ち上がり
両方の補助に

■ 背上げ膝上げ連動機能
または背上げのみ

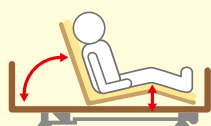

■ 昇降機能

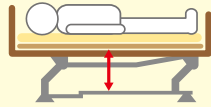


3 モーター タイプ

座位が不安定な方に
足のむくみがある方に

■ 背上げ機能



■ 昇降機能

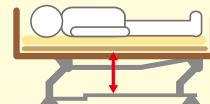

■ 膝上げ機能



※上記はあくまで目安です。福祉用具専門相談員等にご相談ください。

特殊寝台の機能

■ 背上げ機能



- 起き上がりを補助
- 食事を摂る時に便利
- 呼吸を楽にする
- 円背の方の寝る姿勢を楽にする

■ 昇降機能




- 立上がりや車いすへの移乗を補助
- 端座位姿勢を安定させる
- 介助者の腰痛予防

■ 膝上げ機能



- 背上げ機能を使用した時に
身体のずれを防止
- むくみ防止

特殊寝台 (電動ベッド)・付属品名称

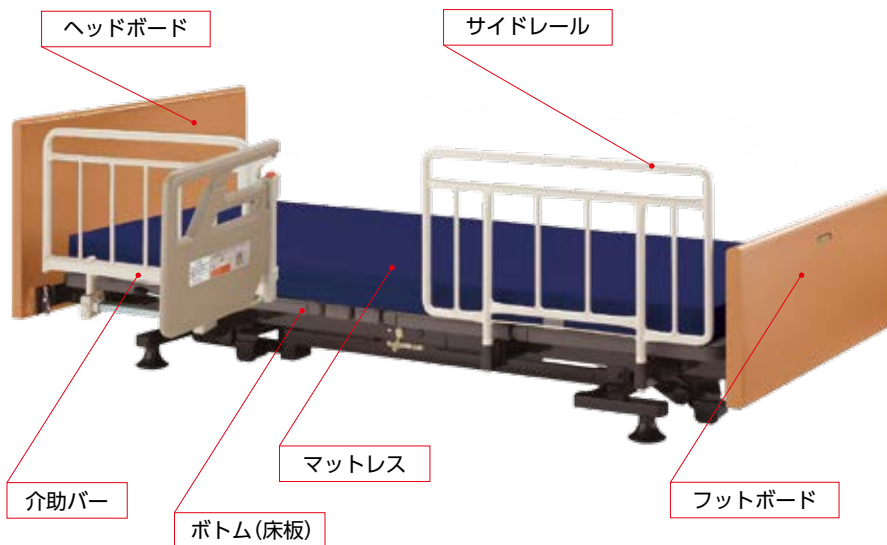

手元スイッチ

サイドレール・介助バー
使用時のご注意

サイドレール・介助バーをご利用の際は、取扱説明書の記載事項を守り、ご利用ください。

特殊寝台 (電動ベッド) の種類

ケア優

ミオレット
フォーユー

楽匠Z



楽匠S




※ベッドの種類を色分けして表記しています。

特殊寝台 (電動ベッド) の置き方

ベッド周辺で使う機器の種類やサイズを確認したうえで設置場所を決めましょう。ベッドへ左右どちらから出入りするかを確認し、配置します。

リフトが必要な場合は使用リフトの動きを配慮

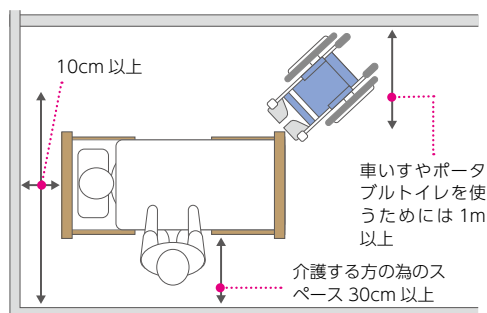

特殊寝台 (電動ベッド) のサイズ

83cm幅



接近しやすく介護がしやすい。

91cm幅



スペースと介護のしやすさを両立。

ショート




適応身長目安
150cm 未満の方

レギュラー



適応身長目安
150cm 以上の方

ベッドサイズの見方

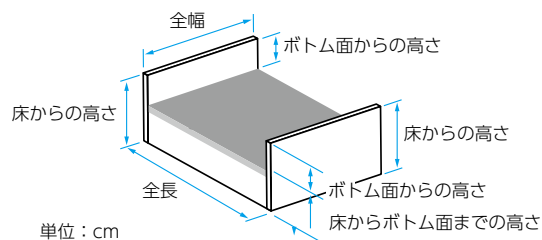

単位: cm

ベッド表示マーク一覧

3 モーター

ボタン操作で「背上げ」「膝上げ」「高さ調節」が個別にできます。

2 モーター

ボタン操作で「背上げ」ベッドの「昇降」ができます。

1 モーター

ボタン操作で「背上げ」またはベッドの「昇降」ができます。

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト・つり具


CARE YOU ケア優

フランスベッド

3 モーター 2 モーター グリーンケア
オリジナル

JIS 福祉用具
MGSL ML0409001
JIS T 9254:2009


ヘッドボード (H)

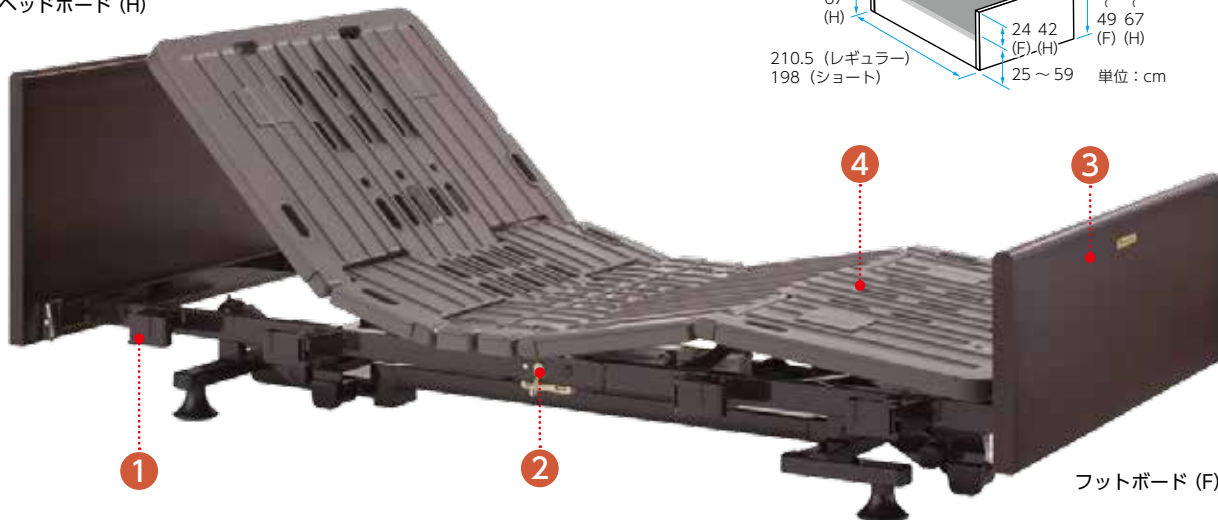

ボードカラー: ダークウォールナット (DW)

ケア優の 優しい特長

1 ノンサイドフレーム+格納式オプション受け

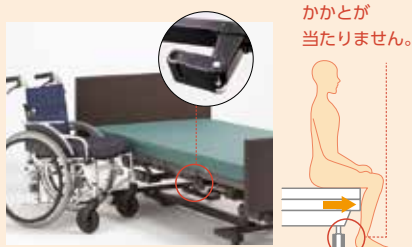

オプション受けが格納できるので、車椅子をベッドへ隙間なく付けることができます。また、サイドフレーム・ベースフレームの突出がなく、端座位が安定しやすくなります。

2 緊急対応スイッチ



背上げ・脚上げ電動時に万が一停電が起きた場合でも、スイッチの切替えにより背上げと脚上げを水平状態に戻すことができます。


3 人にやさしい有機化合物低減素材



「シックハウス症候群」の原因といわれる、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物への対策を行っています。

※エフフォースターとは、ホルムアルデヒドの放散量がゼロもしくは微少である素材を使用しているものに表示できるマークです。

4 膝先水平機能

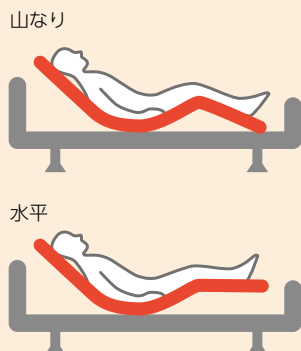

膝から下の角度を2段階に調節可能。足のむくみを抑えます。

5 リモコン



ケア優は選べる16種類

お好みのボードカラー・ボードサイズ・全長サイズ・モーター数をお選びください。

【例】 2R - HF - DW
モーター数 2R 全長サイズ HF ボードサイズ DW ボード色

ボードカラー：ダークウォールナット (DW)

非課税



写真はボードサイズHF

商品名	商品番号	TAISコード
2モーターレギュラーHF (2R-HF-DW)	11-5734-0	00200-000166
重さ：87kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
2モーターショートHF (2S-HF-DW)	11-5739-0	FURANSUBED-CY2SHFDW
重さ：86kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
2モーターレギュラーHH (2R-HH-DW)	11-5738-0	FURANSUBED-CY2HHDW
重さ：89kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
2モーターショートHH (2S-HH-DW)	11-5740-0	FURANSUBED-CY2SHHDW
重さ：88kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

商品名	商品番号	商品コード
3モーターレギュラーHF (3R-HF-DW)	11-5741-0	FURANSUBED-CY3HFDW
重さ：88kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
3モーターショートHF (3S-HF-DW)	11-5743-0	FURANSUBED-CY3SHFDW
重さ：87kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
3モーターレギュラーHH (3R-HH-DW)	11-5742-0	FURANSUBED-CY3HHDW
重さ：90kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
3モーターショートHH (3S-HH-DW)	11-5744-0	FURANSUBED-CY3SHHDW
重さ：89kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

ボードカラー：ビーチ (B)

非課税



写真はボードサイズHH

商品名	商品番号	商品コード
2モーターレギュラーHF (2R-HF-B)	11-5745-0	FURANSUBED-CY2HFBC
重さ：87kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
2モーターショートHF (2S-HF-B)	11-5747-0	FURANSUBED-CY2SHFBC
重さ：86kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
2モーターレギュラーHH (2R-HH-B)	11-5746-0	FURANSUBED-CY2HHBC
重さ：89kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
2モーターショートHH (2S-HH-B)	11-5748-0	FURANSUBED-CY2SHHBC
重さ：88kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

商品名	商品番号	商品コード
3モーターレギュラーHF (3R-HF-B)	11-5749-0	FURANSUBED-CY3HFBC
重さ：88kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
3モーターショートHF (3S-HF-B)	11-5751-0	FURANSUBED-CY3SHFBC
重さ：87kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
3モーターレギュラーHH (3R-HH-B)	11-5750-0	FURANSUBED-CY3HHBC
重さ：90kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
3モーターショートHH (3S-HH-B)	11-5752-0	FURANSUBED-CY3SHHBC
重さ：89kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフトつり具

介護保険レンタル対象品

ケア優付属品

SR-100JJ CSIV

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ベッド専用



数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5249-1	00200-000171
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5239-1	00200-000171
サイズ：全幅 96.5 × ボトム面からの高さ 41.6cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

SR-100JJ CSBR

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ベッド専用



数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5349-1	00200-000171
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5346-1	00200-000171
サイズ：全幅 96.5 × ボトム面からの高さ 41.6cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

SR-300JJ CSIV

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用



数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5250-1	00200-000172
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5241-1	00200-000172
サイズ：全幅 76 × ボトム面からの高さ 41.6cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

SR-300JJ CSBR

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用



数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5351-1	00200-000172
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5348-1	00200-000172
サイズ：全幅 76 × ボトム面からの高さ 41.6cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

SR-100JJS CSBR

フランスベッド

ケア優

ショートサイズ
ベッド専用



数量	商品番号	商品コード
2本セット	19-5350-1	FURANSUBED-SR100JJS
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
数量	商品番号	商品コード
1本	19-5347-1	FURANSUBED-SR100JJS
サイズ：全幅 90.2 × ボトム面からの高さ 41.6cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

SR-800JJ

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ベッド専用




数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5531-1	00200-000173
サイズ：全幅 116 × ボトム面からの高さ 41.6cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

SR-350JJ CS

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

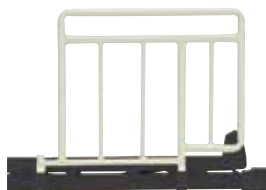

数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5542-1	00200-000471
サイズ：全幅 59 × ボトム面からの高さ 41.6cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円


カバー付サイドレール

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ベッド専用

サイドレールとカバーのセットです。

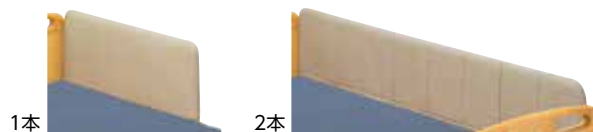

商品名	商品番号	商品コード
SR-100JJ CSIV 1本	19-5616-1	FURANSUBED-SR10C1050
SR-100JJ CSBR 1本	19-5617-1	FURANSUBED-SR10C1050
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	商品コード
SR-100JJ CSIV 2本	19-5618-1	FURANSUBED-SR10C2050
SR-100JJ CSBR 2本	19-5619-1	FURANSUBED-SR10C2050
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

※サイドレールを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、サイドレールも 4 本まで非課税となります。

ケア優付属品

ベッド用グリップ GR-510

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

商品番号	TAISコード
19-5430-1	00200-000428
サイズ：全幅 117.3 × ボトム面からの高さ 41.6cm アーム開閉角度：± 135° (45° 刻み)	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

マルチ移動支援バー SE-07JJ

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

商品番号	TAISコード
19-5242-1	00200-000177
サイズ：全幅 117 × ボトム面からの高さ 41.6cm アーム開閉角度：± 150° (30° 刻み)	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

イルリガートル棒 FF-522

フランスベッド

ケア優

※地域によっては介護保険を適用できない場合があります。

商品番号	
19-5532-1	
TAISコード	
00200-000131	
サイズ：全幅 25 ×全高：98 ～ 165cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円



キャスター 50CAJW(4個1セット)

フランスベッド

ケア優



※ベッドの高さは変わりません。

商品番号	商品コード
19-5243-1	FURANSUBED-50CAJW
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

ケア優サイドレール・介助バー推奨組み合わせ表

ケア優 レギュラーサイズ 全長 210.5cm		ケア優 ショートサイズ 全長 198cm	
1本で使用	2本セットで使用	1本で使用	2本セットで使用
 SR-100JJ	 SR-100JJ + SR-100JJ	 SR-100JJS	 SR-100JJS + SR-100JJS
 SR-300JJ	 SR-300JJ + SR-300JJ	 SR-300JJ	 SR-300JJ + SR-300JJ
 SR-800JJ	 SR-350JJ + SR-350JJ	 SR-350JJ	 SR-300JJ + SR-300JJ
 SR-350JJ	 GR-510 / SE-07JJ + SR-300JJ	 GR-510 / SE-07JJ	 SR-350JJ + SR-350JJ
 GR-510 / SE-07JJ	 GR-510 / SE-07JJ + SR-350JJ	 GR-510 / SE-07JJ	 SR-350JJ + SR-350JJ
 FF-522	 FF-522 + SR-100JJ / SR-300JJ	 FF-522	 FF-522 + SR-100JJS / SR-300JJ


※ 8-9 ページに掲載している商品(キャスター、イルリガートル棒、サイドレールカバーは除く)は、ケア優シリーズとの組み合わせで JIS T 9254:2009 の認証を取得しています。
 ※ 指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

ミオレット・フォーユー

プラッツ

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後、背が上がりだします。
 これにより、足方向へのズレを抑制します。(1モーター・2モーターのみ)
 また、収納式のサイドレールホルダーなので端座位をとりやすくなり、
 立ち上がりや車いすへの移乗が楽になります。

樹脂タイプ

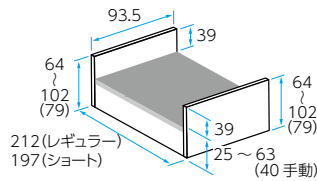


単位：cm
()内は1モーター



商品名	商品番号	TAISコード
1モーターレギュラー	11-5886-0	00631-000186
重さ: 92kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
1モーターショート	11-5887-0	00631-000189
重さ: 90.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

木製フラットタイプ

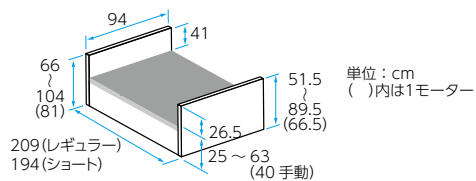

単位：cm
()内は1モーター



商品名	商品番号	TAISコード
1モーターレギュラー	11-5918-0	00631-000184
重さ: 97.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
1モーターショート	11-5919-0	00631-000187
重さ: 96kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円


商品名	商品番号	TAISコード
2モーターレギュラー	11-5883-0	00631-000192
重さ：93.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
2モーターショート	11-5884-0	00631-000195
重さ：92kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
3モーターレギュラー	11-5888-0	00631-000198
重さ：97kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
3モーターショート	11-5889-0	00631-000201
重さ：95.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

商品名	商品番号	TAISコード
2モーターレギュラー	11-5920-0	00631-000190
重さ：99kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
2モーターショート	11-5921-0	00631-000193
重さ：97.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
3モーターレギュラー	11-5922-0	00631-000196
重さ：102.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
3モーターショート	11-5923-0	00631-000199
重さ：101kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。
※サイドレールを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、サイドレールも4本まで非課税となります。

木製宮付タイプ

非課税

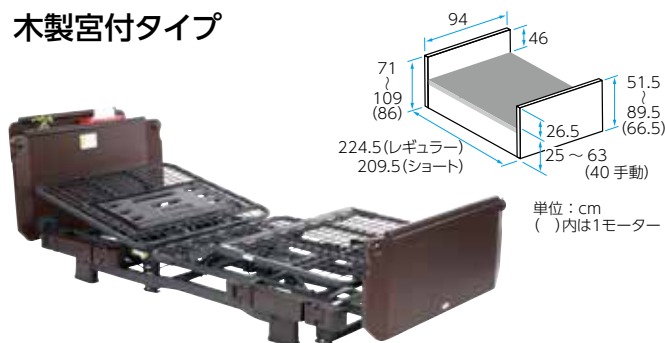

商品名	商品番号	TAISコード
1モーターレギュラー	11-5932-0	00631-000185
重さ：104kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
1モーターショート	11-5933-0	00631-000188
重さ：102.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

商品名	商品番号	TAISコード
2モーターレギュラー	11-5934-0	00631-000191
重さ：105.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
2モーターショート	11-5935-0	00631-000194
重さ：104kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
3モーターレギュラー	11-5936-0	00631-000197
重さ：109kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
商品名	商品番号	TAISコード
3モーターショート	11-5937-0	00631-000200
重さ：107.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

ミオレット・フォーユー付属品

サイドレール BG-75J

ブラッツ

ミオレット
フォーユー レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5496-1	00631-000151
サイズ：全幅 75 × ボトム面からの高さ 40.5cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

ロングサイドレール BG-96J

ブラッツ

ミオレット
フォーユー レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5495-1	00631-000150
サイズ：全幅 96 × ボトム面からの高さ 40.5cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

ショートサイドレール
PA500-FU44


ブラッツ

ミオレット
フォーユー レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5505-1	00631-000202
サイズ：サイドレール部幅 44 × ボトム面からの高さ 40.5cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

安心ひざパッド付自動ロック式
ベッド用グリップ ニーパロP

ブラッツ

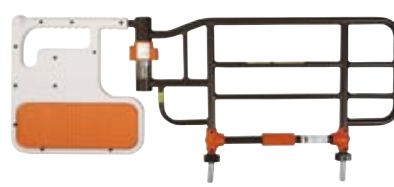ミオレット
フォーユー レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

商品番号	TAISコード
19-5494-1	00631-000181
サイズ：全幅 116.5 × ボトム面からの高さ 40.8cm	
アーム開閉角度：± 135°（45°刻み）	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

キャスター PC500-FU8CKS
(4個1セット)

ブラッツ

ミオレット
フォーユー

※ベッドの高さは変わりません。
※キャスター仕様では、ベッドテーブルは使用しないでください。

商品番号		TAISコード	
19-5503-1		00631-000206	
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円

45mmハイトスパーサーPC501-FU45
(4個1セット)

ブラッツ

ミオレット
フォーユー

※固定脚仕様でベッドテーブルをご使用の際は、当該商品が必要となります。

商品番号		TAISコード	
19-5502-1		00631-000205	
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円

楽匠Z

パラマウントベッド




セーフティーラウンドボード
(樹脂製・木目調)

ベッド全体を傾けることにより、膝を少し曲げて足をさげた姿勢を取ることができる新しい背上げ機構です。
スマートハンドル付は、停電時でもベッドを手動で操作できます。
※一般的な2モーターベッドの機能(背上げ、高さ調節)に加え、ベッド全体を傾ける動きができるモーターが付いています。



リモコン

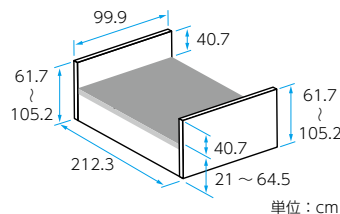

商品名	商品番号	TAISコード
2モーション91cm幅レギュラー KQ-7231	11-5995-0	00170-000777
重さ：85.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

商品名	商品番号	TAISコード
2モーション91cm幅レギュラー KQ-7231S スマートハンドル付	11-5996-0	00170-000781
重さ：86.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

楽匠S


パラマウントベッド



セーフティーラウンドボード
(樹脂製・木目調)



リモコン

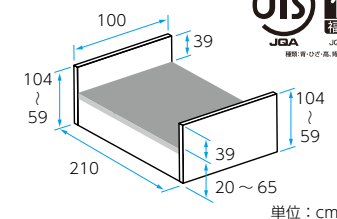

商品名	商品番号	TAISコード
2モーター91cm幅 レギュラー-KQ-9231	11-5732-0	00170-000519
重さ：92.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

楽匠Z／楽匠S付属品

ベッドサイドレール KS-161Q

パラマウントベッド



※楽匠Z・楽匠Sとの組み合わせで JIS T 9254：2009 の認証を取得しています。

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5235-1	00170-000527
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5236-1	00170-000527
サイズ：全幅 96.4 × ボトム面からの高さ 37.5cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

スイングアーム介助バー KS-096A

パラマウントベッド



※楽匠Z・楽匠Sとの組み合わせで JIS T 9254：2009 の認証を取得しています。

商品番号	TAISコード
19-5237-1	00170-000551
サイズ：全幅 110.9 × ボトム面からの高さ 39.5cm アーム開閉角度：± 150° (30° 刻み)	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

※ベッドをキャスターと同時にレンタルした場合、ベッド本体も課税となります。
※サイドレールを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、サイドレールも 4 本まで非課税となります。

テーブル

その他の付属品

ベルトセット付リハビリテーブル
KF-840BS
パラマウントベッドケア優 ミオレット
フォーユー
楽匠Z

商品番号	TAISコード
19-5234-1	00170-000489
全体サイズ：幅 79 × 奥行 58cm 天板：幅 79 × 奥行 50cm ボード高さ：54 ～ 79cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

オーバーベッドテーブル
KF-833LA
パラマウントベッドケア優 ミオレット
フォーユー
楽匠Z 楽匠S

商品番号	TAISコード
19-0168-1	00170-000315
全体サイズ：幅 128.4 × 奥行 63.4cm 天板：幅 128.4 × 奥行 40cm ボード高さ：63 ～ 95cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

ベッドサイドテーブル
KF-1920
パラマウントベッドケア優 ミオレット
フォーユー
楽匠Z 楽匠S

※ミオレット・フォーユー、楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。

商品番号	TAISコード
19-5659-1	00170-000716
全体サイズ：幅 90.7 × 奥行 44.5cm 天板：幅 90 × 奥行 40cm ボード高さ：61 ～ 92.5cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

ベッドサイドテーブル
KF-192
パラマウントベッドケア優 ミオレット
フォーユー
楽匠Z 楽匠S

※ミオレット・フォーユー、楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。

商品番号	TAISコード
19-0142-1	00170-000233
全体サイズ：幅 80.7 × 奥行 42cm 天板：幅 80 × 奥行 40cm ボード高さ：63.5 ～ 92.5cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

ベッドサイドテーブル
ST-136N LO
フランスベッドケア優 ミオレット
フォーユー
楽匠Z 楽匠S

※ミオレット・フォーユー、楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。

商品番号	TAISコード
19-5399-1	00200-000410
全体サイズ：幅 90 × 奥行 40cm 天板：幅 90 × 奥行 40cm ボード高さ：66 ～ 98cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

ガス圧式昇降ベッドテーブル
PZT-840
ブラッツケア優 ミオレット
フォーユー
楽匠Z 楽匠S※ミオレット・フォーユー、楽匠 S と組み合わせる場合、ハイトスペーサーが必要です。
※ミオレット・フォーユーはキャスター装着時はご使用できません。

商品番号	TAISコード
19-5589-1	00631-000178
全体サイズ：幅 84 × 奥行 47cm 天板：幅 84 × 奥行 40cm ボード高さ：60 ～ 84cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

オーバーテーブル (ケア優用) K-135CY

シーホネンス

ケア優



☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

商品番号	商品コード
19-5345-1	SEAHONENCE-K-135CY
全体サイズ：全幅 105.2 × 奥行 30.7cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

オーバーテーブル KQ-060L

パラマウントベッド

楽匠S



商品番号	TAISコード
19-0167-1	00170-000374
サイズ：幅 99.8 × 奥行 31cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

その他

ケアスライダー (MEMS)

モルテン

より安全でスムーズな移乗をサポートします。

グリーンケア
オリジナル

ケア優

ミオレット
フォーユー

楽匠Z

楽匠S



商品番号	TAISコード
19-1301-1	00054-000033
サイズ：幅 35 × 全長 60 × 全高 0.5cm	重さ：1.2kg
材質／オレフィン系樹脂	耐荷重：140kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

ミオレット・フォーユー専用 オーバーテーブル PGT-400LM

プラッツ

ミオレット
フォーユー




商品番号	TAISコード
19-5504-1	00631-000121
サイズ：全幅 100.3 × 奥行 35.8cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

JIS規格認証取得介護ベッド ご使用時のマットレスについて

マットレスの厚さが19cm以下であることをご確認ください。

JIS規格 (JIS T9254：2009) では、圧縮されていない状態のマットレス上面から、サイドレールまたは介助バーの一番高い所までの高さは22cm以上と規定されています。

※エアマットレスをご使用の場合は、マットレスと合わせた厚さが19cm以下となるようにしてください。

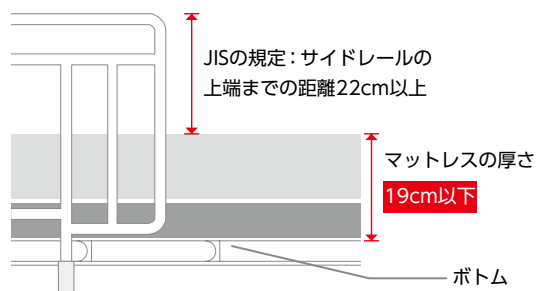

ティコブ移乗用介助ベルト AB31

幸和製作所

安全にベッドからの移乗介助が出来ます。安全に介助者の負担を軽減します。適応胴囲サイズが約60～130cmと小柄な方から大柄な方まで対応できます。保管時に便利な吊り下げ用ストラップ付き。

ベルト裏面に滑り止め付き。



横の取っ手
(狭く無理な力がかかりにくい)

縦の取っ手
(幅広で掴み易い)

商品番号	TAISコード
19-5519-1	00030-000142
サイズ：幅約 12 × 長さ 135cm	重さ：340g
適応胴囲サイズ：約 60 ～ 130cm	最大使用者体重：100kg
材質／本体 (外側) ナイロン、本体 (内側) ポリウレタン、ポリエステル	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

特殊寝台付属品適合表

カテゴリー	商品名	商品番号	掲載 ページ	ケア優	ミオレット・ フォーユー	楽匠Z	楽匠S
サイドレール	SR-100JJ CSIV SR-100JJ CSBR	2本:19-5249-1、1本:19-5239-1 2本:19-5349-1、1本:19-5346-1	8	●			
	SR-300JJ CSIV SR-300JJ CSBR	2本:19-5250-1、1本:19-5241-1 2本:19-5351-1、1本:19-5348-1	8	●			
	SR-100JJS CSBR	2本:19-5350-1、1本:19-5347-1	8	●			
	SR-800JJ	19-5531-1	8	●			
	SR-350JJ CS	19-5542-1	8	●			
	カバー付サイドレール SR-100JJ CSIV SR-100JJ CSBR	2本:19-5618-1、1本:19-5616-1 2本:19-5619-1、1本:19-5617-1	8	●			
	BG-75J	19-5496-1	11		●		
	BG-96J	19-5495-1	11		●		
	PA500-FU44	19-5505-1	11		●		
	KS-161Q	2本:19-5235-1 1本:19-5236-1	12			●	●
介助バー	GR-510 SE-07JJ	19-5430-1 19-5242-1	9	●			
	ベッド用グリップニーパロP	19-5494-1	11		●		
	KS-096A	19-5237-1	12			●	●
テーブル	KF-840BS	19-5234-1	13	●	●	●	
	KF-833LA	19-0168-1	13	●	●	●	●
	KF-1920	19-5659-1	13	●	●注	●	●注
	KF-192	19-0142-1	13	●	●注	●	●注
	ST-136N LO	19-5399-1	13	●	●注	●	●注
	PZT-840	19-5589-1	13	●	●注	●	●注
	K-135CY	19-5345-1	14	●			
	PGT-400LM	19-5504-1	14		●		
	KQ-060L	19-0167-1	14				●
キャスター	50CAJW	19-5243-1	9	●			
	PC500-FU8CKS	19-5503-1	11		●		
その他	イルリガートル棒 FF-522	19-5532-1	9	●			
	45mmハイトスペーサー PC501-FU45	19-5502-1	11		●		

注: ベッド本体にハイトスペーサーを装着することで使用できます。

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

床ずれ防止用具

体位交換器

認知症老人徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフトつり具

マットレス

マットレスは寝心地と寝返りのしやすさと体圧分散効果を配慮して選ぶようにしましょう。特に寝返りが困難な方や臀部の筋肉に萎縮(臀部が痩せている)がある方の場合、床ずれのリスクが高くなっていますので、注意をして選ぶ必要があります。

マットレス一覧



かため


やわらかめ

通気性の良いリバーシブル仕様のマットレス

やややわらかめ

ケアブリーズ トヨーソフランドック

グリーンケア
オリジナル

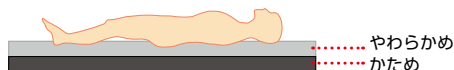

※納入時はカバーにロゴマークが付いている面がやわらかめの面です。


① 選べる寝心地

やわらかな寝心地の「やわらかめ」面と身体がしずみこみにくい「かため」面のリバーシブル仕様となっております。お好みに合わせてご使用ください。

② 軽くて通気性が良い

ムレにくいウレタンフォームと、通気カバーの組み合わせでいつも快適にご使用いただけます。カバーは取外して丸洗いができ、衛生的です。

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 レギュラー	12-5846-1	00523-000019
サイズ: 幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 ショート	12-5847-1	00523-000019
サイズ: 幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 レギュラー	12-5848-1	00523-000019
サイズ: 幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 ショート	12-5849-1	00523-000019
サイズ: 幅 83 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
材質/カバー: ポリエステル 100%、マット: ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

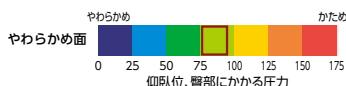

被験者/身長約 160cm、体重約 53kg、
BMI 値約 20.7
測定器/ NA 社製 X センサー


やわらかい層とかたい層が一体になった二重構造のマットレス

やややわらかめ


ケアデュオ 日本ケアサブライ

グリーンケア
オリジナル

お手入れしやすい「防水タイプ」の
カバーです。やさしい寝心地で、
かつ端座位をとるときも姿勢が
安定します。

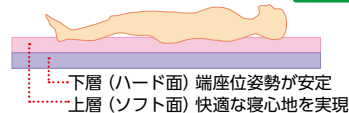

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 レギュラー	12-5642-1	00614-000007
サイズ: 幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 ショート	12-5715-1	00614-000007
サイズ: 幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 セミロング	12-5755-1	00614-000007
サイズ: 幅 90 × 全長 195 × 厚さ 8cm		
材質/カバー: 表地 ウレタン合皮、裏地 ウレタンフィルム、マット: ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

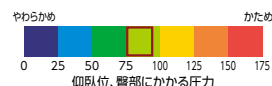

※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも1枚まで非課税となります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドシート関連 (18 ページ) をあわせてご利用ください。

部位によりかたさが異なるマットレス

グリーンケア
オリジナル



ややかため

ケアさらり



日本ケアサブライ

通気性の良いムレにくいマットレスです。

「多層構造」の採用により、
寝姿勢を水平に保つための適度な硬さと
クッション性を実現。
安定した寝姿勢や端座位を
サポートします。

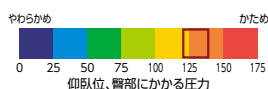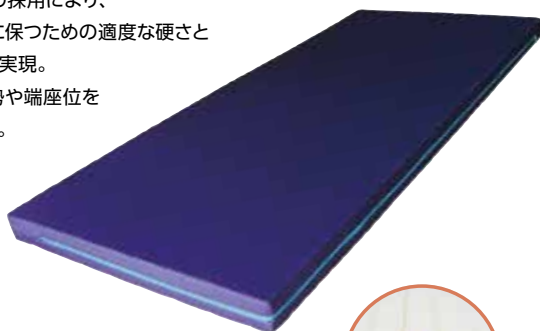

両端は硬く
立ち上がり
をサポート

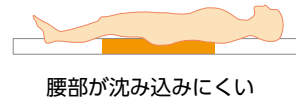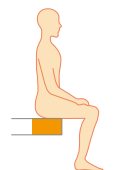

腰部が沈み込みにくい


サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 レギュラー	12-5735-1	00614-000006
サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 ショート	12-5737-1	00614-000006
サイズ：幅 91 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 レギュラー	12-5736-1	00614-000006
サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
材質／カバー、マット：ポリエステル 抗菌防臭加工、防炎加工のカバー		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

やややわらかめ


アルファプラすくっと防水

タイカ

撥水／防水カバータイプ。両端に高硬度ウレタンを使用し、
立ち上がり、起き上がり動作を助けます。
中央部はソフトな寝心地、
両端は硬く立ち上りをサポートします。

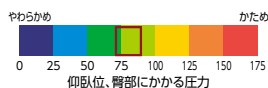

低硬度ウレタン

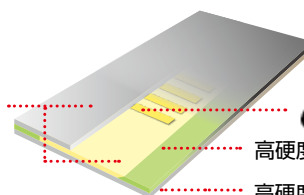

高硬度ウレタンⅠ

高硬度ウレタンⅡ





サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 レギュラー	12-5627-1	00563-000024
サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 9cm		
材質／カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン、マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

やわらかめ

フローラグリーンケアマットレス

ケーブ

体圧をバランスよく受け、良い寝姿勢を保持し、
効果的に体圧を分散します。

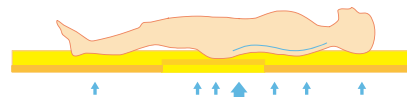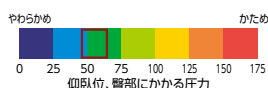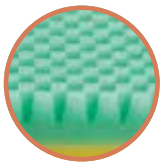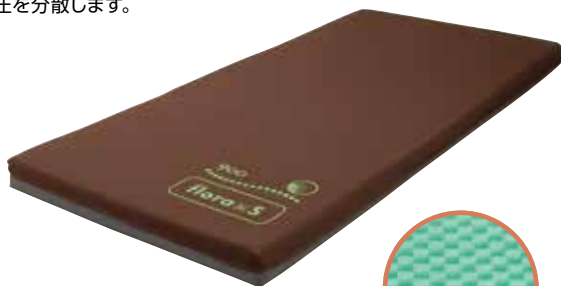

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 CR-480	12-1104-1	00206-000052
サイズ：幅 90 × 全長 191 × 厚さ 9cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 CR-470	12-1103-1	00206-000052
サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 9cm		
材質／上カバー：ポリウレタンラミネート加工布、下カバー：ナイロン 中カバー：ポリエステル、マット：ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています（単位：mmHg）。
被験者／身長 160cm、体重 53kg、BMI 値 20.7 測定器／XSENSOR 社製 XSENSOR®

やわらかめのマットレス

グリーンケア
オリジナル

やややわらかめ

ソフィアグリーンマットレス

モルテン



適度なかたさで快適さと安定感を両立しました。

カバーは「もれない・むれない」

抗菌加工の素材を使用。

少し柔らかめの面とふつつのかたさの

面のリバーシブル仕様です。

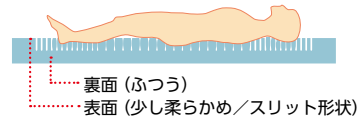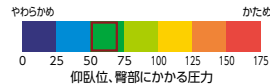

☎：在庫限定品。数量に限りがございます。

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅	12-1304-1	00054-000034

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm

サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅	12-1303-1	00054-000034

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm

材質／カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタンラミネート、マット：ウレタンフォーム

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---


かためのマットレス

ややかため

プレグラーマットレス

パラマウントベッド

ベッドで起き上がる動作や安定した座位姿勢を支援します。

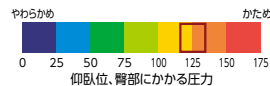

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 KE-551	12-0104-1	00170-000159

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 8cm

サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 KE-553	12-0103-1	00170-000142

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8cm

材質／カバー、マット：ポリエステル


月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

ややかため

ダブルウェーブマットレス

シーホネンス

ベッドで起き上がる動作や安定した座位姿勢を支援します。

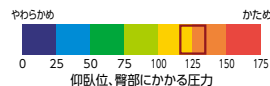

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 レギュラー	12-0202-1	00167-000184

サイズ：幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm

サイズ	商品番号	商品コード
90cm幅 ショート	12-0201-1	SEAHONENCE-MB-2500LS

サイズ：幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm

サイズ	商品番号	商品コード
90cm幅 ロング	12-0203-1	SEAHONENCE-MB-2500LL

サイズ：幅 90 × 全長 205 × 厚さ 8cm

サイズ	商品番号	商品コード
100cm幅 セミダブル	12-0205-1	SEAHONENCE-MB-2500L2R

サイズ：幅 100 × 全長 191 × 厚さ 8cm

材質／カバー、マット：ポリエステル


月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

ベッドシーツ関連

マットレスは、 パッドを敷きシーツをかけて使いましょう。

介護保険対象外販売品

シーツやカバーを使用し、むれにくく清潔な環境をつくりましょう。快適さが増し、床ずれなどの予防にもつながります。また、マットレスやベッドを汗や汚れから守るため、お手入れも楽になります。こまめに交換できるように予備を用意しておくくと便利です。

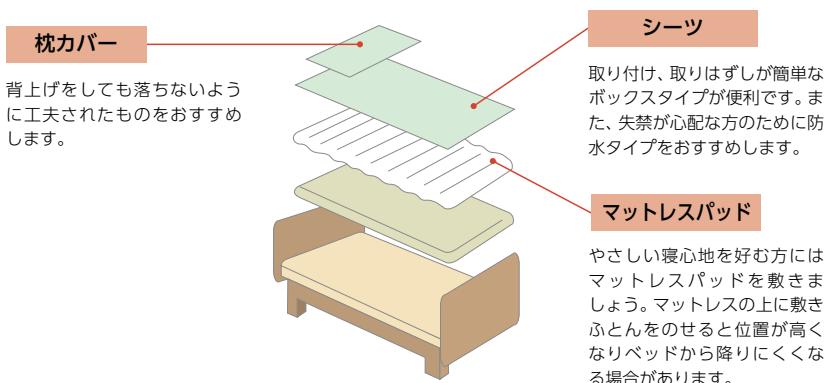

枕カバー

背上げをしても落ちないように工夫されたものをおすすめします。

シーツ

取り付け、取りはずしが簡単なボックスタイプが便利です。また、失禁が心配な方のために防水タイプをおすすめします。

マットレスパッド

やさしい寝心地を好む方にはマットレスパッドを敷きましょう。マットレスの上に敷きふとんをのせると位置が高くなりベッドから降りにくくなる場合があります。

パイルシーツ

竹虎（ヒューマンケア）



防水タイプの柔らかく肌ざわりのよいパイルシーツです。

カラー	商品番号
黄色	51-5342-1
水色	51-5343-1

サイズ：幅 150 × 全長 90cm

材質／綿80%+ポリエステル20%（ポリウレタンラミネート加工）

メーカー希望
小売価格

3,780 円

※掲載以外の商品も取り扱っております。

※マットレスを非課税のベッドと同時にレンタルした場合、マットレスも1枚まで非課税となります。※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています（単位：mmHg）。被験者／身長 160cm、体重 53kg、BMI 値 20.7 測定器／XSENSOR 社製 XSENSOR®